

## Инструкция картридж контроля качества для газовых анализаторов RapidPoint 400/405/500

SMN	Description	Наименование
10310323	AQC Cartridge	Картридж контроля качества


### 1. Замена картриджа автоматического контроля качества.

Символ AutomaticQC Cartridge (Картридж автоматического контроля качества) появляется в заголовке, когда остается только 10 или меньше образцов для любого уровня материала контроля качества, или когда остается менее 24 часов до того момента, когда

истекает срок годности картриджа. Это позволяет заменить картридж в то время, когда система не занята. Система автоматически выводит на экран сообщение, если вам необходимо заменить картридж перед тем, как вы сможете выполнять другие задачи


**ОСТОРОЖНО:** Не устанавливайте картридж при обесточенной системе.

1. Если появится строка приглашения, введите свой пароль или сканируйте его с помощью сканера штрих-кодов.
2. На экране анализа, коснитесь к кнопке Status (Статус). Смотрите Рисунок

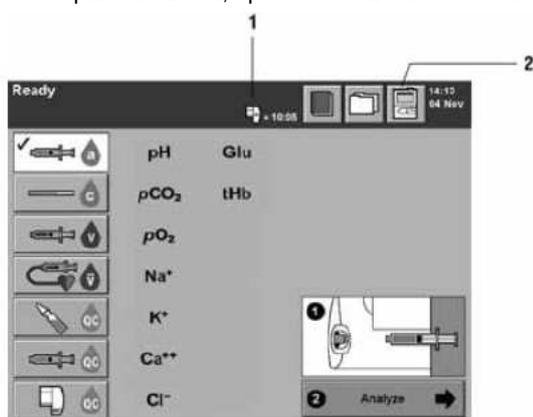

1 Появится символ AutomaticQC Cartridge (Картридж автоматического контроля качества), когда картридж будет близок к исчерпанию своего ресурса.

2 Коснитесь кнопки Status (Статус) для замены картриджа.

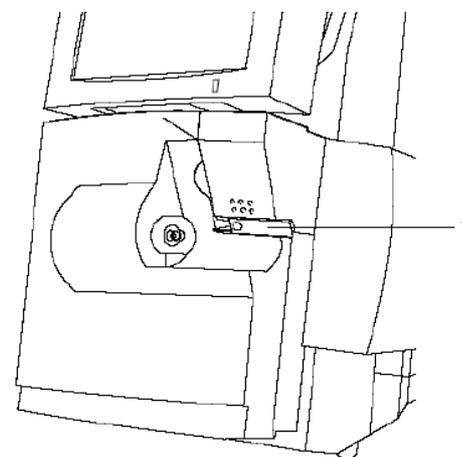

1 Откройте соединительный разъем картриджа.

3. На экране статуса коснитесь к кнопке AutomaticQC Cartridge (Картридж автоматического контроля качества).
4. Прикоснитесь к надписи Replace (Заменить). Система проигрывает видеозапись, которая показывает, как выполнить данную процедуру.
5. Просмотрите видео перед тем, как начнете процедуру, если это необходимо.
6. Надавите и затем сдвиньте соединительный разъем на картридже автоматического контроля качества вправо. Смотрите Рисунок

7. Подождите, пока картридж автоматического контроля качества будет вытолкнут из системы.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При нормальной эксплуатации картридж автоматического контроля качества не контактирует с биологически опасными материалами из системы. Тем не менее, если вы заподозрили, что картридж заражен, утилизируйте его согласно протоколу вашего учреждения по утилизации биологически опасных материалов.


8. Удалите картридж автоматического контроля качества и утилизируйте его. См.Рис.

9. Вставьте новый картридж автоматического контроля качества:

а. Получите новый картридж и удалите желтую карточку из под рычага.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Удостоверьтесь, что рычаг зафиксирован на месте.

б. Надавите на рычаг уверенным движением рядом с выпуклыми точками для того, чтобы закрыть и защелкнуть рычаг в картридже. Смотрите Рисунок.

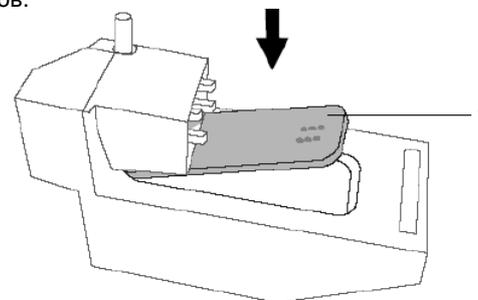


1 Надавите большими пальцами рук, чтобы зафиксировать рычаг в картридже.


ПРИМЕЧАНИЕ: После того, как надавите на картридж, высвободите руки и проверьте, двигается ли картридж вперед. Если это так, надавите снова, чтобы удостовериться, что он закреплен на месте.

с. Вставьте картридж в систему и затем надавите твердо на выпуклые точки, пока вы не услышите, что картридж зафиксировался на месте. Смотрите Рисунок

10. Сдвиньте соединительный разъем картриджа влево для того, чтобы закрыть его. Появится экран ожидания, пока система подготавливает картридж. Экран анализа появится, когда картридж будет готов к использованию.

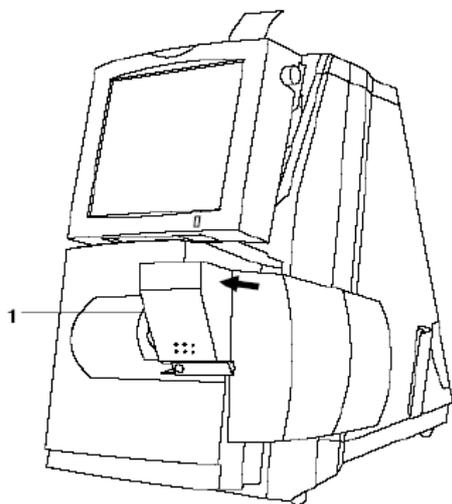

1 Удалите картридж автоматического контроля качества.

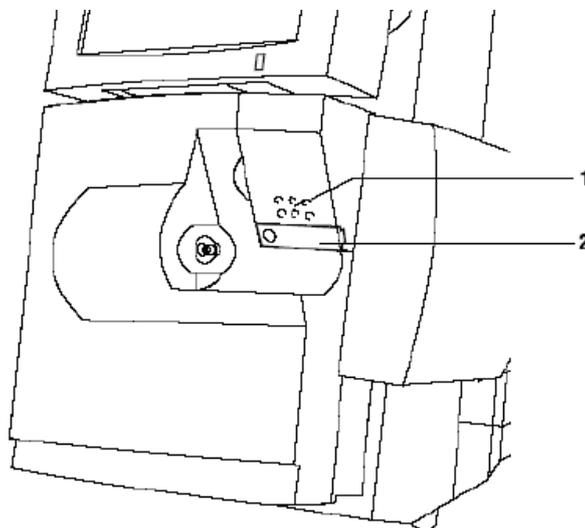

1 Надавите твердо на выпуклые точки, пока не услышите, что картридж зафиксирован на месте.  
2 Сдвиньте соединительный разъем влево, для того, чтобы закрыть его.

## 2. Эксплуатация картриджа

Используйте картридж автоматического контроля качества в соответствии с инструкцией пользователя газового анализатора

Контактная информация в России  
ООО «Сименс», Сектор  
Здравоохранения  
Адрес: Москва, 115184,  
ул. Большая Татарская, 9  
Тел.: + 7 495 737 10 10  
Факс: + 7 495 737 13 20  
[www.siemens.ru/healthcare](http://www.siemens.ru/healthcare)