
Картридж для промывки и отходов

Картридж для промывки и отходов содержит промывочный реагент, очищающий путь тестирования образца после анализа и калибровки.




БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ

Обращайтесь с картриджами для промывки и отходов с истекшим сроком годности как с потенциально инфекционными материалами. Всегда соблюдайте общие меры предосторожности при обращении с загрязненным оборудованием или потенциально инфекционными материалами. Рекомендуемые меры предосторожности при работе с биологически опасными материалами см. в разделе *Индивидуальная защита от источников биологической опасности*

В картридже также хранятся жидкие отходы. Биологически опасная отработанная жидкость контактирует только со сменными картриджами систем RAPIDPoint 500 и никогда не соприкасается с другими компонентами системы. Отработанная жидкость герметично заключается в картридже для промывки и отходов при замене картриджа. Картридж для промывки и отходов представлен на Рис. 1-10.

Рис. 1-10: Картридж для промывки и отходов

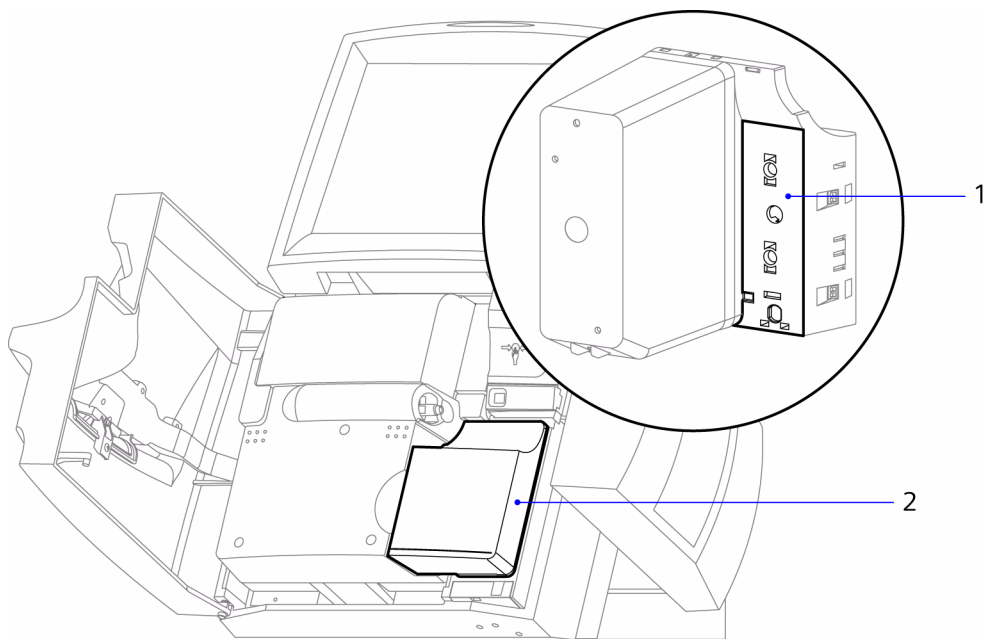

- 1 Соединения картриджа для промывки и отходов с измерительным картриджем
- 2 Картридж для промывки и отходов

Описание этих компонентов приводится ниже.

- Соединения картриджа для промывки и отходов с измерительным картриджем обеспечивают очистку пути тестирования образца промывочным реагентом и поступление отработанной жидкости в картридж для промывки и отходов без контакта с компонентами системы.
- Картридж для промывки и отходов выполняет очистку пути тестирования образца и сбор отработанной жидкости.

Каждый картридж рассчитан для использования в течение 10 дней после установки в системе. Система сообщит, когда придет время заменить картридж.

Картриджи для промывки и отходов следует хранить охлажденными или при комнатной температуре (2°–25 °C).

Замена картриджа для промывки и отходов

Значок **Wash/Waste Cartridge** (Картридж для промывки и отходов) появляется в строке заголовка, когда остается возможность проанализировать 30 или меньше образцов или когда до окончания срока годности картриджа остается менее 24 часов. Это позволяет заменить картридж в то время, когда система не занята. Система автоматически выводит сообщение о том, что прежде чем можно будет выполнять другие задачи, необходимо заменить картридж.

Примечание Если появится сообщение о необходимости замены картриджа, перейдите к шагу 4 описанной ниже процедуры.

Если необходимо заменить и измерительный картридж, и картридж для промывки и отходов, обратитесь к разделу *Замена измерительного картриджа и картриджа для промывки и отходов*, стр. 5-4.

Материал: картридж для промывки и отходов

Для замены картриджа для промывки и отходов выполните следующие действия.

1. При запросе введите пароль или отсканируйте его с помощью сканера штрих-кода.
2. На экране **Analysis** (Анализ) нажмите кнопку **System** (Система).



БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ

Ознакомьтесь с рекомендуемыми мерами предосторожности при работе с биологически опасными материалами, приведенными в разделе *Индивидуальная защита от источников биологической опасности*

Примечание Значок картриджа для промывки и отходов появляется на экране **Analysis** (Анализ), когда срок действия картриджа подходит к концу.

3. На экране **System** (Система) нажмите кнопку **Wash/Waste Cartridge** (Картридж для промывки и отходов).

Примечание Убедитесь, что ничего не мешает открытию дверцы.

4. Выберите **Replace** (Заменить).

На экране будет продемонстрирован видеоролик, объясняющий, как выполнить эту процедуру.

5. Если необходимо, просмотрите его, прежде чем начинать.

6. Откройте дверцу.

Примечание Если во время замены картриджа вам потребуется помощь, нажмите кнопку **Видео**, чтобы просмотреть видеоролик еще раз.


7. Замените картридж. См. Рис. 5-1.

- a. Извлеките картридж для промывки и отходов и утилизируйте его в соответствии с правилами вашего учреждения по утилизации биологически опасных материалов.
- b. Установите в систему новый картридж для промывки и отходов и сильно надавите в месте, обозначенном точкой, чтобы картридж встал на место со щелчком.
- c. Закройте дверцу системы.

Пока система будет подготавливать картридж, будет отображаться экран **Wait** (Ожидание). Когда картридж будет готов к работе, появится экран **Analysis** (Анализ).

Примечание Картридж для промывки и отходов предназначен только для разового применения. Если картридж для промывки и отходов извлечь из системы, его невозможно установить обратно.

Рис. 5-1: Замена картриджа для промывки и отходов

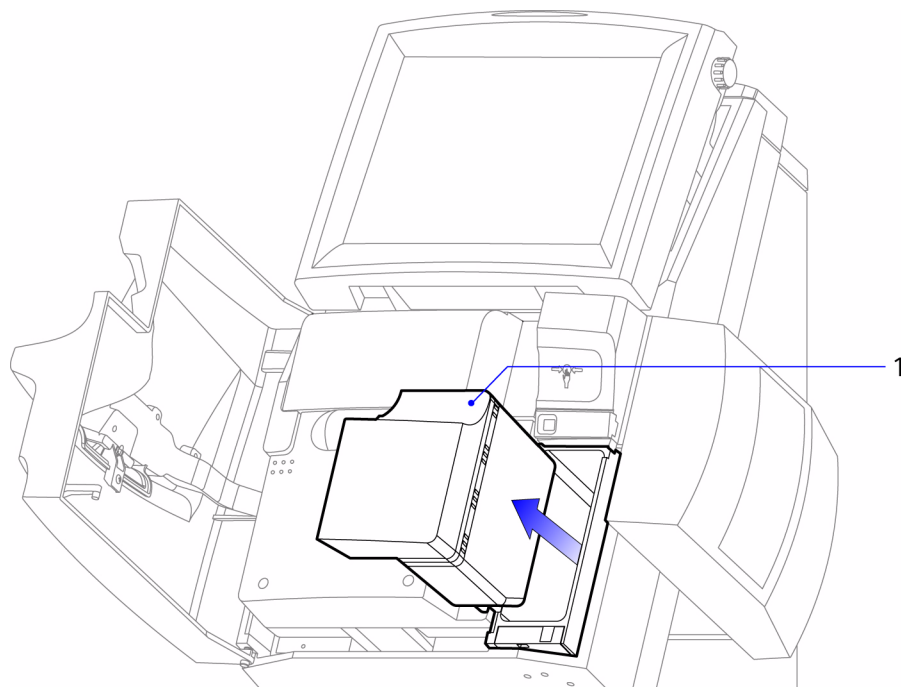

1 Картридж для промывки и отходов
